


**Coalgan**<sup>®</sup>  
ADHÉSIF



**STOP SAIGNEMENT**

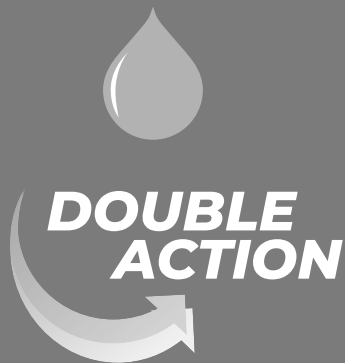

**CICATRISATION**

**12 PANSEMENTS  
STÉRILES**

**2 FORMATS**  
**6 x (7,2 x 2,5 cm)**  
**6 x (7,2 x 3,4 cm)**

**BROTHIER**  
LABORATOIRES

## COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

Coalgan<sup>®</sup> ADHÉSIF, stérile, est composé d'une compresse bio-active de fibres d'alginate de calcium\* sur un support adhésif à haute tolérance cutanée.

La compresse libère son calcium pour accélérer l'agrégation des plaquettes et favoriser la cicatrisation.

Les fibres d'alginate de calcium se gélifient au contact du sang permettant ainsi un retrait indolore.

## INDICATIONS

Saignement et cicatrisation des plaies cutanées superficielles :

- Coupures
- Ampoules ouvertes
- Petites plaies

Coalgan<sup>®</sup> ADHÉSIF s'utilise chez l'enfant, l'adulte et la femme enceinte et est recommandé chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux (Rendu-Osler, von Willebrand, Hémophilie) ou acquis (sous antiagrégants plaquettaires, anti-vitamine K ou héparines).

Un saignement persistant nécessite un avis médical.

## CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Aucune contre-indication connue à ce jour.

Coalgan<sup>®</sup> ADHÉSIF contient des traces de tensio-actif, son utilisation peut provoquer des réactions d'hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés.

*\*Issu d'algues marines*

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance. Vérifier l'intégrité du sachet avant l'utilisation du produit.

## MODE D'UTILISATION



Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9%).

Appliquer Coalgan® ADHÉSIF directement sur la blessure en exerçant une légère pression pendant quelques secondes.

Au retrait, ne pas essayer de retirer les éventuelles fibres qui subsistent dans la plaie ou dans la croûte, elles disparaîtront d'elles-mêmes avec cette dernière.

## INTERACTIONS

Coalgan® ADHÉSIF ne doit pas être utilisé avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9%) avant d'appliquer Coalgan® ADHÉSIF.

## STÉRILISATION

Produit stérile, stérilisé par rayonnement  $\beta$ . Ne pas re-stériliser.

## CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière. Respecter la date limite d'utilisation.

## EXISTE AUSSI EN POUDRE ET EN COMPRESSE

Coalgan® POUDRE

*pour les :*

- Coupures, écorchures
- Erythèmes fessiers suintants
- Plaies du cuir chevelu

Coalgan® COMPRESSE

*pour les saignements :*

- De nez
- Buccaux
- Des plaies superficielles
- Des zones très vascularisées (arcades sourcilières,...)

*pour les brûlures superficielles et suintantes*

**CE**  
0459  
Depuis 2014.

Les Laboratoires BROTHIER  
41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex, France

[www.brothier.com](http://www.brothier.com)

[www.coalgan-gamme.com](http://www.coalgan-gamme.com)

## SITE DE PRODUCTION

ZA des Roches - 49590 Fontevraud l'Abbaye - France

**0 800 355 153**

Service & appel  
gratuits

[info@brothier.com](mailto:info@brothier.com)